

VEINOPLUS® DVT

Et helt nyt bærbart simpelt EMS apparat til extra DVT (deep vein thrombosis) profylakse. Veino plus DVT bruges på hospitaler og efter udskrivelse i mange tilfælde, hvor der er øget risiko for DVT. DVT opstår ofte i venerne i læg eller lår.

Hvorfor bruge Veinoplus DVT?

- 1 Fjerne venøs stase i underbenene
- 2 Forhindre kramper eller smerter
- 3 Forhindre thrombformationer
- 4 Acceleration af blodgennemstrømningen
- 5 Fysisk bevægelse (som "lægpumpen" selv)



Se dokumentationen på vores hjemmeside www.adremtechnology.com

Hvornår kan jeg bruge Veinoplus DVT?

- 1 Operationer hvor der er høj risiko for DVT
Ortopædkirurgiske operationer (fx knæ og hofter)
Abdominelle operationer
Neurokirurgi
Multiple traumer
- 2 Høj risiko patienter
Cancer patienter
Tidligere venetromboser
Overvægt
Lang immobilisation
Andre sygdomme med øget thrombetendens
Ældre

Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på det eller de ramte ben, i siddende eller halvt siddende stilling
- 2 Øg intensiteten langsomt for derved at se og føle en dyb muskelkontraktion
- 3 Det er nemt at bruge: et enkelt program, der slukker automatisk efter 180 minutter
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det des bedre.

Må ikke benyttes i forbindelse med pacemaker eller implanteret defibrillator. Ved tvivl konsulter din læge.

Brugen af Veinoplus arterial kan ikke erstatte din behandling for DVT profylakse



Content : VEINOPLUS® DVT enhed - Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose – bærerem

Ref: 3401048883018

Tilbehør



VEINOPLUS® Pakke elektroder
Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange.
Størrelse : 8 x 13cm

Ref: 3401042705354