

SÅDAN TAGER DU DIN PROTESE AF OG PÅ (UNDERBENS-PROTESE)

CRUS-PROTESE

På benstumpen og låret bruges først en lang uld- eller bomuldsstrømpe. Herefter trækkes crus-manchetten på ved at trække i yderste snip af strømpen.

Du kan nu, siddende med bøjet knæ, åbne lårhylsteret og træde ned i protesen. Pres knæet godt fremad og spænd den nederste rem, hvis en sådan findes.

Ellers skal snøren nu sættes i og strammes til, og helst så den nederste del er strammest.

Strømpens øverste kant kan nu glattes og bøjes ned over kanten af protesen.

KNÆ-EX-PROTESE

Ofte er det muligt at træde direkte ned i protesen med eller uden en tynd strømpe og fixere protesen med sug, rem eller snøre.

Protesen kan være fremstillet med løst inderhylster, fleksibelt lårstykke eller med snørelukning. Den kan også være lavet med bløde områder i hylsteret.

Disse forskellige systemer vælges ud fra hensynet om at få en komfortabel protese, som er nem at sætte på.

Bandagist Jan Nielsen A/S

Ortopædisk Bandageri



Frederiksborggade 23, 1360, København K

Tidsbestilling +45 3311 8557

Klinik@bjn.dk

www.bjn.dk

Vi er stolte af at støtte

! Dansk Røde Kors | SOS Børnebyerne | Kræftens Bekæmpelse !